

EFFIVET™

ELIMINA GERMES E LIMPA

SOLUÇÃO GERMICIDA INOVADORA E EFICAZ

UMA MUDANÇA RADICAL NA ACÇÃO DE TRATAMENTO PROFISSIONAL DE FERIDAS



ANTI-BACTERIANO • ANTI-FÚNGICO • ANTI-VIRAL

TESTADO DERMATOLOGICAMENTE

PluriVet®
www.plurivet.pt

SEM ÁLCOOL.

LIMPA
E
HIGIENIZA



Feridas e cortes



Arranhões



Olhos



Elimina Bactérias



Higiene Dental



pH neutro



Irritações da pele



Queimaduras e abrasões

“O principal objectivo da cicatrização das feridas não é a sua reparação técnica, mas sim providenciar condições propícias para ocorrer o processo de regeneração natural da ferida”.

Richard Lammers (Roberts & Hedges)

EFFIVET™ – A Ciência

O Effivet contém uma tecnologia patenteada e mimetiza o sistema imunitário, contendo o ácido hipocloroso que actua naturalmente no organismo.

A sua fórmula antibacteriana funciona ajudando a combater as bactérias, fungos e vírus.

O ácido hipocloroso elimina os microrganismos através de uma redução positiva do oxigénio, o que num estado de pH neutro é muito eficaz a romper a parede celular e permitir que a solução penetre, eliminando assim as bactérias.

EFFIVET™ – Controlo farmacêutico regulamentar

Os estudos científicos comprovados do Effivet demonstram a sua eficácia de eliminação de microrganismos patogénicos, tendo sido também dermatologicamente testado enquanto hipoalergénico.

Clinicamente comprovado

- ✓ Co-solução.
- ✓ Ajudará a acelerar a cicatrização.
- ✓ Controlo de infecções.
- ✓ Redução da inflamação.
- ✓ Indicado para Caninos, Felinos, Equinos, Bovinos, Caprinos, Ovinos, Suínos e Animais Exóticos.

Características dos produtos da gama Effivet

- ✓ Estimulação do sistema imunitário.
- ✓ É adequada a sua utilização desde o nascimento.
- ✓ Menos tempo de cicatrização.
- ✓ Controlo de infecções.
- ✓ Efeito anti-bacteriano, anti-fúngico e anti-viral.
- ✓ Limpa e suaviza naturalmente.
- ✓ Seguro se lambido pelo animal.
- ✓ Seguro para usar junto à boca, orelhas e olhos do animal.
- ✓ Com pH neutro, não causa ardor nem irritação.
- ✓ Elimina os odores causados pelas bactérias.
- ✓ Não necessita de enxugar.
- ✓ Não contém antibióticos, esteróides, álcool nem iodo.
- ✓ Mais concentrado.

O ácido hipocloroso não é citotóxico para células humanas ou animais.

Vantagens de utilização do EFFIVET™

- ✓ **Effivet consegue reduzir as bactérias causadoras de infecções** (inclusive resistentes a antibióticos como a estirpe *MRSA Staphylococcus aureus* e a estirpe *VRE - Enterococcus faecalis*), **de vírus e de fungos.**
- ✓ Aumenta o fluxo sanguíneo no local da ferida, permitindo um aporte extra de oxigénio e nutrientes, ajudando a reduzir os tempos de cicatrização.
- ✓ 100% não tóxico e não irritante - com pH neutro, pode ser usado em muitas espécies de animais (incluindo animais de competição – não é considerado agente dopante).
- ✓ Não danifica o tecido saudável, combatendo as bactérias, e elimina o odor das feridas em menos de 24 horas, ajudando a evitar assim a presença de moscas na zona afectada.

Effivet vs Géis à base de álcool / desinfectantes:

QUÍMICOS/RELAÇÃO DE SEGURANÇA	Effivet	A base de Alcool
Sem Álcool	✓	✗
Elimina 99.9% das bactérias	✓	✓
Não é tóxico (venenoso)	✓	✗
Não contém químicos tóxicos	✓	✗
Não causa alergia	✓	✗
Não causa dermatite	✓	✗
Não necessita de enxugar (apenas nas mãos)	✓	✓
Não necessita de enxugar (superfícies)	✓	✗
Seguro em caso de engolido ou lambido	✓	✗
“Amigo” do ambiente	✓	✗

MUITO IMPORTANTE: para obter um óptimo resultado com Effivet, **não** aplicar na zona afectada: clorexidina, iodo, água oxigenada, cicatrizantes, antibióticos tópicos ou similares, pois impedem o correcto funcionamento do Effivet.

Limpar a zona afectada apenas com água ou soro fisiológico.

EFFIVET™

SKIN & WOUND

Coadjuvante na acção de tratamento profissional de feridas

Para a pele e feridas, adequado para várias espécies de animais. É um spray com ácido hipocloroso que aumenta o fluxo sanguíneo para a zona da ferida, daí a pele poder tornar-se mais rosada após a sua aplicação. Elimina bactérias, fungos e vírus, reduzindo a inflamação e eliminando o odor. Funciona ajudando o sistema imunitário do animal no combate de infecções e ajuda a diminuir o tempo de cicatrização.

Utilização:

- ✓ Limpeza e desbridamento de feridas, cortes e abrasões.
- ✓ Queimaduras.
- ✓ Feridas, cortes, lacerações e abrasões.
- ✓ Cuidados das áreas pós-cirúrgicas.
- ✓ Desinfecção de incisões cirúrgicas.
- ✓ Diminuição do tempo de cicatrização.
- ✓ Alívio do prurido.
- ✓ No cuidado dos olhos.

Modo de emprego:

- ✓ Retirar o excesso de pelo da zona da ferida.
- ✓ Tosquiar se necessário.
- ✓ Ajustar o bocal de pulverização se necessário.
- ✓ Borrifar até saturar a área afectada.
- ✓ Deixar secar naturalmente.
- ✓ Repetir 3 a 4 vezes por dia ou de acordo com o protocolo indicado pelo Médico Veterinário.

Composição:

Skin & Wound Líquido: Ácido Hipocloroso (HClO) - 0,033%,
Água ionizada, Cloreto de Sódio.

Skin & Wound Hidrogel: Ácido Hipocloroso (HClO) - 0,035%,
Água ionizada, Cloreto de Sódio, Fluorossilicato de Magnésio e Sódio,
Fosfato monossódico.

O Hidrogel tem o propósito de se fixar na área lesada e evaporar devagar, aumentando o tempo de contacto e a eficácia do produto em determinadas situações.

Espécies Alvo: Caninos, Felinos, Equinos, Bovinos, Caprinos, Ovinos, Suínos e Animais Exóticos.

Intervalo de segurança: Carne e vísceras: 0 dias.

Apresentações:

Skin & Wound Líquido: 60 ml, 250 ml e 750 ml (N.º de AV: 930/00/19PUVPT)

Skin & Wound Hidrogel: 60 ml, 250 ml e 750 ml (N.º de AV: 929/00/19PUVPT)



Outras aplicações:

Uso em superfícies como mesas cirúrgicas e de exame:

- ✓ Elimina os microrganismos.
- ✓ Elimina o odor causado pelas bactérias.

Recomendações:

- ✓ Em feridas profundas:
 - Lavar e limpar bem a ferida com Effivet Líquido e preencher a ferida com Effivet Hidrogel.
 - Se preferir proteger uma ferida em particular, borrifar o Hidrogel na ferida e na ligadura.
 - Na aplicação seguinte, usar o Effivet Líquido para remover quaisquer resíduos do Hidrogel.
 - Se o Effivet for usado separadamente (Líquido ou Hidrogel), usar a formulação Líquida em feridas superficiais e o Hidrogel em feridas profundas e sujas.
- A viscosidade do Hidrogel é reduzida.



Feridas e cortes



Arranhões



Olhos



Elimina Bactérias



Higiene Dental



pH neutro



Irritações da pele



Queimaduras e abrasões

EFFIVET⁺ SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Coadjuvante de acção de tratamento em casos de olhos arranhados ou afectados por queimaduras, picadas, poluentes e contaminantes.

O Effivet Solução Oftálmica é aplicado na limpeza, infecções e inflamações oculares. Também é útil para remover manchas lacrimais e para remover detritos em redor da área do olho.



Utilização:

- ✓ Limpeza, infecções e irritações oculares.
- ✓ Alívio da sensação de ardor e comichão.
- ✓ Em casos de ferida actual na redução da inflamação.
- ✓ Não enxugar.
- ✓ 100% biocompatível e não tóxico.
- ✓ A fórmula do produto é baseada em compostos similares produzidos pelo próprio sistema imunitário do animal.
- ✓ Tendo o mesmo pH que o fluido lacrimal, não vai causar ardor aquando da aplicação.

Modo de emprego:

Lavar suavemente com Effivet Solução Oftálmica os olhos afetados 3 a 4 vezes por dia até os sinais desaparecerem, ou consoante indicação do Médico Veterinário.

Composição:

Ácido Hipocloroso (HClO) - 0,024%; Água ionizada; Cloreto de Sódio.

Espécies Alvo: Caninos, Felinos, Equinos, Bovinos, Caprinos, Ovinos, Suínos e Animais Exóticos.

Intervalo de segurança: Carne e vísceras: 0 dias.

Apresentações:

Líquido: 60 ml (N.º de AV: 931/00/19PUVPT)

EFFIVET⁺ ORAL CARE

Coadjuvante de acção de tratamento e profilaxia de doença periodontal.

O Effivet Fórmula Dental Oral Care em Líquido e com o sistema de pulverizador, garante uma melhor distribuição e adesão do produto à cavidade oral, sendo mais prático de aplicar. O spray pronto a usar não necessita de ser misturado ou diluído e não é necessário o uso de luvas na sua aplicação. O Effivet Oral Care Hidrogel tem o propósito de se fixar na área lesada e evaporar devagar aumentando o tempo de contacto e a eficácia do produto em determinadas situações.



Utilização:

- ✓ Promove o tratamento de úlceras, irritações e lacerações nos lábios, palato, língua e dobras labiais.
- ✓ Feridas causadas por processos virais felinos.
- ✓ Higiene oral após procedimentos de limpeza dentária.
- ✓ Extrações dentárias.
- ✓ Úlceras e lacerações em áreas de junção mucocutânea.
- ✓ Feridas cirúrgicas orais.
- ✓ Limpeza e prevenção de infecções devido a intervenções.
- ✓ Reduz o mau hálito.
- ✓ Higiene dentária.
- ✓ pH neutro.
- ✓ Limpa e acalma.

Composição:

Effivet Oral Care Líquido

Ácido Hipocloroso (HClO) - 0,024%; Água ionizada; Cloreto de Sódio.

Effivet Oral Care Hidrogel

Ácido Hipocloroso (HClO) - 0,026%; Água ionizada; Cloreto de Sódio; Fluorossilicato de magnésio e sódio; Fosfato monossódico.

Espécies-alvo: Cães, Gatos e Cavalos de desporto.

Intervalo de segurança:

Não aplicável.

Apresentação:

Oral Care Líquido: 60 ml (N.º de AV: 1125/00/20PUVPT)

Oral Care Hidrogel: 60 ml (N.º de AV: 1126/00/20PUVPT)

Clinicamente comprovado:

- ✓ O Effivet Oral Care é uma solução antimicrobiana que promove uma boa saúde oral, ajudando a combater bactérias, fungos e vírus e a diminuir o tempo de cicatrização.
- ✓ Com uma formulação sem álcool e pH neutro, pode ser utilizada para aliviar irritações e problemas periodontais graves, como sangramento gengival, aversão à alimentação (recusa alimentar) e mau hálito.
- ✓ A sua acção principal consiste na limpeza e remoção das principais causas de infecções da boca.

Modo de emprego:

Aplicar Effivet Oral Care livremente de forma directa em redor da área e limpar conforme necessário ou consoante indicação do Médico Veterinário.